



## DISPOSITIVO V-VEIL UP2

**AUXILIA NA AUTOCOLETA GINECOLÓGICA  
DE AMOSTRAS VAGINAIS UTILIZADAS NO  
DIAGNÓSTICO DE HPV E OUTRAS IST.**

### INOVAÇÃO EM COLETAS GINECOLÓGICAS.

O dispositivo **V-Veil UP2** é destinado à coleta de amostragem em cavidade vaginal, sem que seja necessária a intervenção de um profissional de saúde. Com um procedimento seguro e prático, as coletas podem ser feitas pela própria paciente em até 10 minutos.

As amostras podem ser utilizadas para diagnóstico *in vitro* de infecções por patógenos como o papilomavírus humano (HPV) e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

### IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), incluindo o papilomavírus humano (HPV), são um problema de saúde pública. Elas atingem milhares de pessoas e causam um impacto direto na saúde reprodutiva e infantil, como infertilidade, complicações gestacionais, morte fetal, entre outras consequências.

O diagnóstico precoce das IST é de suma importância para que ocorra o controle das infecções. Nestes casos, a atenção às múltiplas apresentações clínicas e aos exames de rotina é essencial para a rapidez na identificação e tratamento do paciente, incluindo os assintomáticos.

A simplificação do processo da coleta facilita o acesso de mais pacientes ao exame, permitindo a identificação e controle de infecções e lesões precocemente. Foram desenvolvidos dispositivos que possibilitam a autocoleta de diversas amostras biológicas, ampliando os métodos diagnósticos. Essa inovação reduz o intervalo entre os exames ginecológicos, otimizando a prática médica. Além disso, estimula o acompanhamento regular e os exames periódicos, resultando em detecção precoce e controle epidemiológico mais eficazes.

## INSTRUÇÕES DE USO



Com cuidado, abra o plástico que reveste o dispositivo.



Segure o dispositivo de autocoleta pela parte plástica livre e não revestida com o tecido.



Insira o dispositivo de coleta dentro da vagina, cuidadosamente, segurando-o pela haste plástica.



Retire o dispositivo cuidadosamente, puxando pela ponta livre do tecido e armazene no tubo entregue pela clínica.



Deixe o tecido do dispositivo de coleta dentro da vagina de 5-10 minutos.



Após corretamente posicionado, retire apenas a haste plástica do dispositivo, deixando o tecido de revestimento dentro da vagina.

## CONDIÇÕES IMPORTANTES PARA O USO DO V-VEIL UP2

Após a realização da coleta, todas as amostras precisam ser armazenadas conforme recomendações abaixo e, posteriormente, transportadas para o laboratório de apoio responsável pela realização dos testes dentro das condições definidas.

## AMOSTRAS SECAS / SEM MEIO DE PRESERVAÇÃO

As amostras coletadas com o dispositivo V-Veil UP2, podem ser armazenadas a 2-8°C por no máximo 3 dias. Para armazenamento mais longo, é recomendado congelá-las a -20°C, sendo estáveis por até 1 mês.

## AMOSTRAS COM MEIO DE PRESERVAÇÃO

As amostras coletadas com o dispositivo V-Veil UP2 podem ser armazenadas em meio de preservação a 4-37°C, por até 6 semanas.

### MODELO

VVUPP/CE/UP2/125-14/1B/  
EN-ES/VIT/BULK-A

### APRESENTAÇÃO

1 Coletor Vaginal V-Veil UP2

MAD-VVC-D

1 Coletor Vaginal V-Veil UP2  
1 Tubo de transporte

MAD-VVC

1 Coletor Vaginal V-Veil UP2  
1 Tubo de transporte com meio  
de preservação

REGISTRO ANVISA 80502070099



Saiba mais informações sobre o kit

☎ 0800-710 1850

🌐 [mobiustlife.com.br](http://mobiustlife.com.br)

✉ [comercial@mobiustlife.com.br](mailto:comercial@mobiustlife.com.br)

**MOBIUS**  
Parcerias únicas.  
Soluções personalizadas.